


Guide Rapide Pour Le Platinum®


Toujours se laver les mains à l'eau chaude et au savon avant de manipuler les pièces du HygieniKit

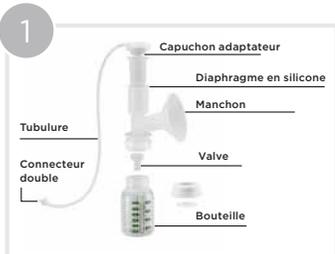

- Si le système HygieniKit est marqué stérile, utilisez-le tel quel (il est préassemblé).
- S'il n'est pas stérile, consultez les instructions de nettoyage du HygieniKit page 14.



- Insérez le connecteur double dans le tire-lait.

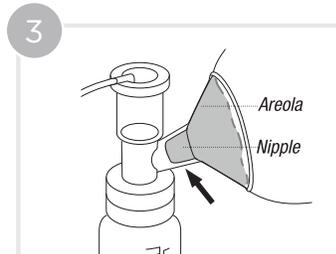

- Centrez le(s) manchon(s) sur le(s) mamelon(s) pour bien sceller.
- Consultez le guide de taille de manchons en page 16.



- Mettre le tire-lait en marche en enfonçant la touche « on »
- La vitesse démarre automatiquement à 80 cycles par minute.
- La succion part au réglage le plus bas.



Pour imiter la succion du bébé afin de déclencher l'écoulement du lait :

- Appuyez sur le bouton de succion pour changer de niveau.
- Vous pouvez commencer à 10 % et continuer à augmenter graduellement la succion pour arriver au niveau le plus confortable.



Pour imiter le changement de rythme du bébé vers des suctions lentes et profondes :

- Quand le lait coule :
 - Appuyez sur le bouton de vitesse vers la bas pour ralentir l'appareil et faciliter l'écoulement du lait.
 - Essayez la vitesse à 50 cycles /minute Ajustez la vitesse selon vos besoins pour confortablement drainer le lait.
- Augmentez la succion mais seulement jusqu'au niveau maximum de confort.



Quand le débit de lait ralentit, essayez un autre réflexe d'éjection :

- Augmentez la vitesse jusqu'à 80 cycles par minute.
- Lorsque le lait coule à nouveau, réduisez la vitesse pour faciliter l'écoulement.