



Instructions

1. Enroulez le Joeyband bien serré autour de votre taille, puis fixez les bandes Velcro dans votre dos ou sur le côté
2. Avec le bébé posé sur votre poitrine (l'oreille au niveau de votre cœur), faites glisser le Joeyband le long de votre torse en l'étirant doucement par-dessus le bébé ; le Joeyband doit épouser les fesses et le torse du bébé afin qu'il ne puisse pas glisser à travers ; veillez à ce que la tête du bébé reste découverte
3. Pour retirer le bébé afin de le transférer dans son lit, il suffit d'étirer le Joeyband et de le faire glisser le long de votre taille jusqu'à ce qu'il ne touche plus du tout le bébé, en soutenant ce dernier à tout moment pour éviter qu'il ne tombe.

Utilisation conforme et sécuritaire



- **À utiliser uniquement en position assise ou allongée**
- Surveillez régulièrement votre bébé ; assurez-vous de toujours voir son visage et qu'il respire correctement, en veillant tout particulièrement à ce que son visage ne soit pas appuyé contre le Joeyband, votre corps ou vos vêtements
- Assurez-vous que votre bébé respire correctement en vérifiant que son menton ne repose pas sur sa poitrine
- Restez vigilant(e) lorsque vous portez votre bébé ; s'endormir en portant votre bébé augmente le risque d'étouffement, de suffocation et de blessure
- si vous vous sentez somnolent(e) pendant que vous tenez ou nourrissez votre bébé. Couchez votre bébé en toute sécurité sur le dos dans son berceau
- Appelez le personnel hospitalier pour qu'il vous aide si vous êtes incapable ou trop fatigué(e) pour vous lever en toute sécurité et mettre votre bébé dans son berceau.
- Ne placez pas le bébé dans le Joeyband à l'intérieur de votre manteau fermé, car cela pourrait entraîner une suffocation
- Si vous utilisez le Joeyband pendant l'allaitement, assurez-vous que le nez de bébé n'est pas obstrué
- Faites preuve de prudence, de soin et de bon sens lorsque votre bébé est dans le Joeyband : ne buvez pas de liquides chauds au-dessus de la tête de bébé et ne laissez pas tomber d'objets lourds sur lui
- Vérifiez toujours votre Joeyband avant de l'utiliser ; vérifiez les coutures et la fermeture Velcro ainsi que l'absence de trous dans le tissu. Cessez de l'utiliser si quoi que ce soit est susceptible de nuire à votre bébé.
- Assurez-vous que le Velcro ne frotte pas contre le bébé ; cela pourrait provoquer une irritation.
- Faites preuve de prudence lorsque vous portez des vêtements délicats ou en tricot.
- Instructions de lavage : lavage en machine, séchage à plat OU séchage en machine à basse température (attachez le Velcro pour éviter qu'il ne s'accroche). Peut être utilisé jusqu'à 10 fois en milieu hospitalier.



Liste de vérification:

- On voit son visage
- La tête est en position de reniflement
- Le nez et la bouche ne sont pas couverts
- La tête est tournée sur le côté
- Le cou est droit, pas courbé
- Les épaules sont bien plaquées contre la personne
- Poitrine contre poitrine avec maman ou papa
- Les jambes sont fléchies (voir ci-dessous)
- La personne est légèrement redressée, pas allongée à plat dans le lit ou sur la chaise
- Couvrez le dos avec des couvertures pour plus de chaleur

Si personne ne peut veiller sur vous et votre bébé après les tétées et au moment où il risque de s'endormir, couchez-le sur le dos dans son propre lit.

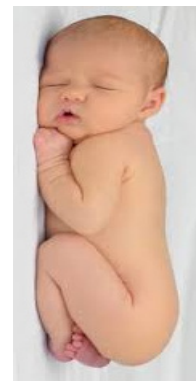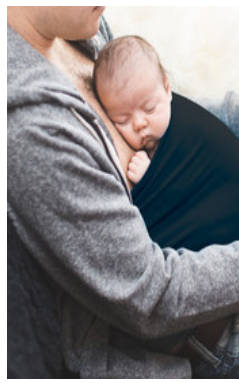

Les jambes sont fléchies