


Préparation du sac Thermo-Liner™

- N'utiliser qu'un seul sac à usage unique par patient (12-heures)
- Noter les informations sur la poche de recouvrement (nom du patient, nom du soignant, date et heure, autres informations relatives à la garde)
- Ouvrir le compartiment extérieur (fermeture à glissière bleue) et remplir d'eau à température ambiante jusqu'au repère de niveau
- Pour fermer, appuyez fermement sur toute la longueur de la fermeture à glissière bleue afin d'assurer une bonne étanchéité (Il faut préparer le sac de recouvrement toutes les 12 heures)
- Insérez délicatement le récipient d'alimentation dans le compartiment intérieur du sac. Poussez doucement le récipient jusqu'au fond du sac. (Remarque : veillez à manipuler avec précaution les récipients de lait lorsque vous les retirez du sac intérieur et que vous les y replacez, afin d'éviter tout risque de détérioration.)
- Placez délicatement le sac de protection avec le récipient d'alimentation dans le compartiment du chauffe-biberon. Veillez à l'enfoncer doucement jusqu'au fond du compartiment.



Pour réchauffer / décongeler


- Allumez l'appareil en basculant l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière sur la position « ON ». Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt situé à l'avant pour démarrer
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir un mode parmi les trois options, puis appuyez sur le bouton correspondant à la coche verte pour valider :

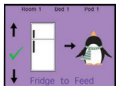

Fridge To Feed
(Du frigo à l'allaitement)



Frozen To Feed
(Du congélateur à l'allaitement)

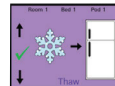

Thaw
(Décongélation)



- Choisissez la taille de conteneur ou de volume la plus proche

Le Penguin affichera un message clignotant sur l'écran LCD vous invitant à insérer le sac Thermo-Liner. Si le sac Thermo-Liner a déjà été inséré conformément aux instructions de préparation ci-dessus, passez aux étapes suivantes.

- Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer le préchauffage

- L'écran devient VERT dès que l'alimentation est prête. Vous entendrez également un bip sonore

- Une fois le cycle de préchauffage terminé, il y a une période d'attente de 30 minutes, puis l'écran devient rouge pour signaler qu'il faut rejeter le produit

- Retirez le sac Thermo-Liner recyclable et appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil

Le temps de maintien s'applique uniquement aux modes de réchauffage. En mode décongélation, retirez immédiatement l'aliment.

