

MODE D'EMPLOI - Consignes importantes ci-dessous : veuillez les lire attentivement et les conserver.

Bouteilles réutilisables autoclavables - Mode d'emploi - Références produit : 14093 et 14093/W

Pour les hôpitaux et les banques de lait, veuillez vérifier auprès de votre service de prévention des infections si vous pouvez réutiliser les bouteilles. Cela dépendra de la manière dont vous prévoyez de laver et de stériliser les bouteilles et les tétines.

Les graduations sont données à titre indicatif uniquement et sont conformes aux exigences de la norme BS EN 14350:2020. Elles ne doivent pas être utilisées comme instrument de mesure.

Consignes d'utilisation - Ne pas utiliser si l'emballage d'origine ou le produit présente des signes de détérioration ou de fragilité. Inspecter tous les composants avant utilisation et jeter le produit si des imperfections sont visibles. Retirer tout l'emballage avant d'utiliser le flacon. Avant chaque utilisation suivante, nettoyer soigneusement le flacon pour garantir une bonne hygiène.

Restrictions d'utilisation - Ce produit ne convient pas à une utilisation avec des liquides dont la température dépasse 80 °C. Ce produit est adapté à la pasteurisation (les produits portant la mention « PA » ne doivent pas être immergés). Ce produit peut être congelé jusqu'à -25 °C. Ne remplissez pas au-delà du repère maximal indiqué sur le bouteille. Les bouteilles munies de bouchons scellés par une feuille d'aluminium ne peuvent être réutilisées que 5 fois : un nouveau bouchon doit être utilisé à chaque fois (n'essayez pas de reposer un bouchon déjà utilisé).

Informations et restrictions relatives à la stérilisation – Lavez et stérilisez tous les composants immédiatement après utilisation. Pour les hôpitaux et les banques de lait, ce produit ne peut être utilisé que 5 fois par cycle de stérilisation. Pour un usage domestique, continuez à réutiliser le produit jusqu'à ce qu'il présente des signes visibles d'usure, puis jetez-le dès que ceux-ci apparaissent.

Ce produit peut être stérilisé en autoclave (max. 121 °C pendant 20 min), au lave-vaisselle, au micro-ondes, à l'eau froide et à la vapeur. Remarque : les bouchons des références 14093 et 14093/W ne sont pas adaptés à l'autoclavage. En cas d'utilisation d'un lave-vaisselle, choisissez un détergent doux (pH inférieur à 9,0) afin d'éviter tout dommage ou défaillance prématurée. Après la stérilisation, vérifiez soigneusement que chaque composant ne présente pas de dommages ou de déformation avant de le réutiliser, et jetez-le si des imperfections sont visibles

Bouteilles à usage unique – Mode d'emploi - Références produit : 11200, 14000/14100, 14001/14101, 14002/14102, 14003/14103,

Les graduations sont données à titre indicatif uniquement et sont conformes aux exigences de la norme BS EN 14350:2020. Elles ne doivent pas être utilisées comme instrument de mesure.

Consignes d'utilisation – Pour les produits 11200, ne pas utiliser si l'emballage primaire ou le produit présente des signes de détérioration ou de fragilité. Inspecter chaque composant avant utilisation et le jeter si des imperfections sont visibles. Retirer tout l'emballage avant d'utiliser le produit.

Restrictions d'utilisation - Ces produits ne doivent pas être utilisés avec des liquides dont la température dépasse 80 °C. Ces produits conviennent à la pasteurisation (à l'exception du modèle 11200). Ne pas remplir au-delà du repère maximal indiqué sur le bouteille. Les bouteilles sont à usage unique et doivent être jetées après la première utilisation. Ces produits peuvent être congelés jusqu'à -25 °C. Note: Medicare Colgate guarantees these products when used according to the above instructions.

Medicare Colgate décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage et ne procédera à aucun remplacement ni remboursement lorsque ceux-ci résultent d'une utilisation non conforme de ce produit.